

SOP – OBLAČENJE

Gasilska šola

25.3.2020

Verzija: 2.0

VSTOPNO IZSTOPNA TOČKA – DOLOČITEV

- MESTO NAJMANJ 3 m – 5 m OD OKUŽENEGA;

PRIPRAVI VREČO ZA:

- ODPADEK** (KOMBINEZON, ROKAVICE, FFP3 RESPIRATOR);
- DEZINFEKCIJO OPREME** (ŠKORNJI, OČALA ITD.)

Vreče polnimo do $\frac{3}{4}$!

PRIPRAVI SE

VSE OSEBNE PREDMETE ODLOŽI, (NAKIT, DOKUMENTI, URA
DENARNICA TELEFON ITD.)

- POPIJ $\frac{1}{2}$ L TEKOČINE**

OBLAČENJE

- ODSTRANI EMBALAŽO**
- SEZUJ OBUTEV**
- PRILAGODI DOLŽINO ELASTIČNEGA TRAKU NA OČALIH**

OPOZORILA

**IZOGIBAJ SE OSTRIH ROBOV, KONIČASTIH
ORODIJ, UDARCEM IN PADCEM;**

OB POŠKODBI TYVEKA:

**POŠKODOVAN DEL RAZKUŽI IN PRELEPI S SREBRNIM
LEPILNIM TRAKOM (V NADALJEVANJU LEPILNI TRAK)
LEPILNI TRAK IN RAZKUŽILO VZEMI S SEBOJ!**

1.		<p><input type="checkbox"/> <u>PRED UPORABO</u> PREGLED TYVEKA – morebitne poškodbe) VELIKO PAPIRNATO ZAPONKO NAMESTI NA ZADRGO – lažje slačenje)</p>
2.		<p><input type="checkbox"/> <u>OBLAČENJE</u> OBLECI KOMBINEZON, KAPUCE ŠE NE NAMESTI</p>
3.		<p><input type="checkbox"/> <u>ŠKORNJI</u> HLAČNICE NAMESTI ČEZ GUMIJASTE ŠKORNJE S POLOVICO STRANICE LEPLILNEGA TRAKU OBLEPI KOMBINEZON IN Z DRUGO ŠKORENJE. NA PETI PUSTI 2 cm UHO TRAKU ZA ODSTRANITEV</p>
4.		<p><input type="checkbox"/> <u>RESPIRATOR</u> FIKSIRAJ S KRIŽNO NAMESTITVIJO TRAKOV</p>
5.		<p><input type="checkbox"/> <u>TEST TESNOSTI</u> V PREDELU NOSU IN PREOSTALEM OBODU RESPIRATOR PRITISNEMO K OBRAZU S PALCEM IN KAZALCEM IN VDIHNEMO</p>
6.		<p><input type="checkbox"/> <u>NAMESTIMO KAPUCO</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>ZADRGO ZAPNEMO</u> GLAVO VES ČAS DRŽIMO GOR</p>

7.		<input type="checkbox"/> <u>ZADRGO ZALEPIMO</u> GLAVO VES ČAS DRŽIMO GOR
8.		<input type="checkbox"/> <u>ZAŠČITNA OČALA</u> NAMESTIMO PREKO ZUNANJEGA DELA KAPUCE <u>DOSEČI ČIM BOLJŠE NALEGANJE</u> <i>VRZELI MED TYVEKOM, MASKO IN OČALI NAJ BODO</i> <i>ČIM MANJŠE!</i>
9.		<input type="checkbox"/> <u>NOTRANJE ROKAVICE – NAMESTI</u>
10.		<input type="checkbox"/> <u>NAPALČNIK – NAMESTI</u> <i>PREPREČITEV ZDRSA ROKAVA</i> <i>MED DELOM!</i>
11.		<input type="checkbox"/> <u>ZUNANJE ROKAVICE – NAMESTI</u> ČEZ NAPALČNIKE <i>POVLEČI JIH ČIM BOLJ PREKO ZAPESTJA;</i> <i>S PRVO POLOVICO LEPILNEGA TRAKU KROŽNO , NA</i> <i>RAHLO, ZLEPI ROKAVICO IN Z DRUGO ROKAV.</i> <i>NA PETI PUSTI 2 cm UHO TRAKU ZA ODSTRANITEV</i>
12.		<u>ZADNJI PREGLED – PREVERI 100 %:</u> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PREKRITOST TELESA; <input type="checkbox"/> NEPOŠKODOVANOST TYVEKA; <input type="checkbox"/> ZADRGA ZAPETA DO KONCA IN ZALEPLJENA <input type="checkbox"/> NAMESTITEV MASKE, OČAL IN KAPUCE; <input type="checkbox"/> RESPIRATOR – TESNO PRILEGANJE